

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **АЛЬФАЗОКС**

### **ALFASOXX**

Раствор для приема внутрь

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 19 ноября 2018 года № РЗН 2017/5664

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

«Афарм С.р.л.»

Виа Рома, 26 - 28041 Арона (НО), Италия

#### **СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Раствор для приема внутрь Альфазокс, пакетики – саше 10 мл, одна доза. В упаковке 20 пакетиков – саше.

#### **ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Прозрачная жидкость янтарно-жёлтого цвета с фруктовым запахом. рН:  $5,00 \pm 0,2$ . Плотность:  $1,10 \pm 0,05$ . Вязкость: 0-150 ц/с

#### **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:**

Медицинское изделие Альфазокс действует механически, обеспечивая быстрое устранение симптомов, обусловленных гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР).

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) характеризуется такими симптомами как изжога, кислотный рефлюкс либо некислотный (смешанный, щелочной) рефлюкс, кашель и дисфония, которые могут быть связаны с наличием эрозивных дефектов слизистой пищевода. Выраженность симптомов ГЭРБ часто усиливается в положении на спине, поэтому состояние пациентов ухудшается в ночное время.

Комбинация гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата обеспечивает защиту слизистой оболочки желудка и пищевода. Наличие в составе Альфазокс компонента «Полоксамер 407», обладающего высокой способностью к биоадгезии, обеспечивает надёжный контакт комплекса «гиалуроновая кислота – хондроитина сульфат» с поверхностью стенки пищевода, способствуя её защите от агрессивного воздействия соляной кислоты желудка. Хондроитина сульфат также способствует восстановлению слизистой оболочки пищевода и желудка. Альфазокс способствует снижению воспаления и заживлению эрозий слизистой при эзофагитах и гастродуоденитах.

#### **ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Лечение гастроэзофагеального рефлюкса

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не рекомендуется применять Альфазокс в случаях известной или подозреваемой повышенной чувствительности к любому его компоненту.

Не рекомендуется применять Альфазокс беременным и кормящим женщинам, так как соответствующие исследования не проводились.

#### **УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**



Нельзя превышать рекомендованную дозу. Если симптомы ГЭР сохраняются, или возникли нежелательные явления, необходимо обратиться к врачу. Нельзя применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

**Ингредиенты:** натрия гиалуронат, хондроитина сульфат натрия, ксилитол С, полоксамер 407, поливинилпирролидон, бензоат натрия, сорбат калия, ароматизатор, вода.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

**Пакетики-саше:** по 1 пакетику (10 мл) после основных приёмов пищи и перед сном или в соответствии с рекомендациями врача.

**ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ**

Символ	Значение
	Производитель
	Номер партии
	Изготовлено в соответствии с Директивой Европейского сообщества 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях.
	Ознакомьтесь с инструкцией по применению
	Использовать до

**ХРАНЕНИЕ:** При температуре от +5 °С до +30 °С. Не замораживать.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 36 месяцев

**УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:** утилизируется как домашний мусор.

**СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

ООО «Альфасигма Рус»

125009 г. Москва, Тверская ул., 22/2 корп. 1, 4 этаж, пом. VII, комн.1.

Тел/факс: +7 (495) 225-3626, эл. адрес: [info.ru@alfasigma.com](mailto:info.ru@alfasigma.com)

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: «Альфасигма С.п.А.», Италия, Alfasigma S.p.A., Via Ragazzi del 99` , 5, 40133 Bologna, Italia